



TOTALBOOTS®

TOTALBOOTS®

PRESSURE THERAPY





Descripción

TOTALBOOTS Recovery system es una excelente opción para cualquiera que busque un sistema de recuperación avanzado. Al ofrecer dos modos diferentes de compresión, la capacidad de ajustar la presión de cada compresión y múltiples opciones de tiempo, este sistema se posiciona como uno de los mejores sistemas de arranque de compresión en el mercado actual.

Contenido del paquete

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Caja de Presentación |
| | Accesorio de miembro inferior |
| | Consola de Control |
| | Mochila de Transporte |
| | Manual de usuario |

Accesorio de miembro inferior



- ① Zona de presión pie
- ② Zona de presión pierna
- ③ Zona de presión rodilla
- ④ Zona de presión muslo
- ⑤ Conector del accesorio

| Talla | Dimensiones |
|-------|----------------|
| L | 107cm de largo |
| | 30cm ancho |
| XL | 107cm de largo |
| | 35cm ancho |
| XXL | 107cm de largo |
| | 40cm ancho |



Consola de Control



Consumo de energía: 30 W

Voltaje: 220V ~ 60Hz

Fusible interno: T2A

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura: 10° C ~ 40° C

Humedad relativa: 20% ~ 90%

Presión atmosférica: 860hPa~1060 hPa

Condiciones de almacenamiento:

Temperatura: 10° C ~ 50° C

Humedad relativa: 10% ~ 95%

Presión atmosférica: 190 hPa~1060 hPa

Advertencias

El Sistema **TOTALBOOTS** solo debe ser operado por personal médico calificado o fisioterapeuta.

La operación de estas unidades por cualquier otra persona es completamente responsable por sí misma.

El Sistema no es apto para su uso en presencia de mezclas inflamables con aire o con oxígeno u óxido nitroso.

No utilizar un cable de alimentación dañado o deshilachado. Desenchufe la consola y remita el servicio a personal calificado en las siguientes condiciones:

- Siempre apague la consola antes de descomprimir las prendas.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Si ha entrado líquido en la consola.
- Si la carcasa exterior de plástico está dañada.
- Si la consola no funciona normalmente, funcionamiento continuo,
- Funcionamiento ruidoso o bajo rendimiento.


Garantía

TOTALBOOTS recovery system ofrece a sus clientes una garantía de 1 año en todo lo relacionado con nuestro producto.

Si durante el primer año de la compra del dispositivo, este sufre alguna falla de fabrica en material o función, será llevado a revisión técnica en caso requiera repuestos o un dispositivo nuevo sin recargo alguno.

Esta garantía excluye:

- Daños ocasionados por accidentes, mal uso o transporte.
- Accesorios no utilizados según su función.
- Accesorios reparados por alguien no autorizado.
- Deterioro por un mal almacenamiento.
- Retraso en notificación de la falla después del plazo de compra.

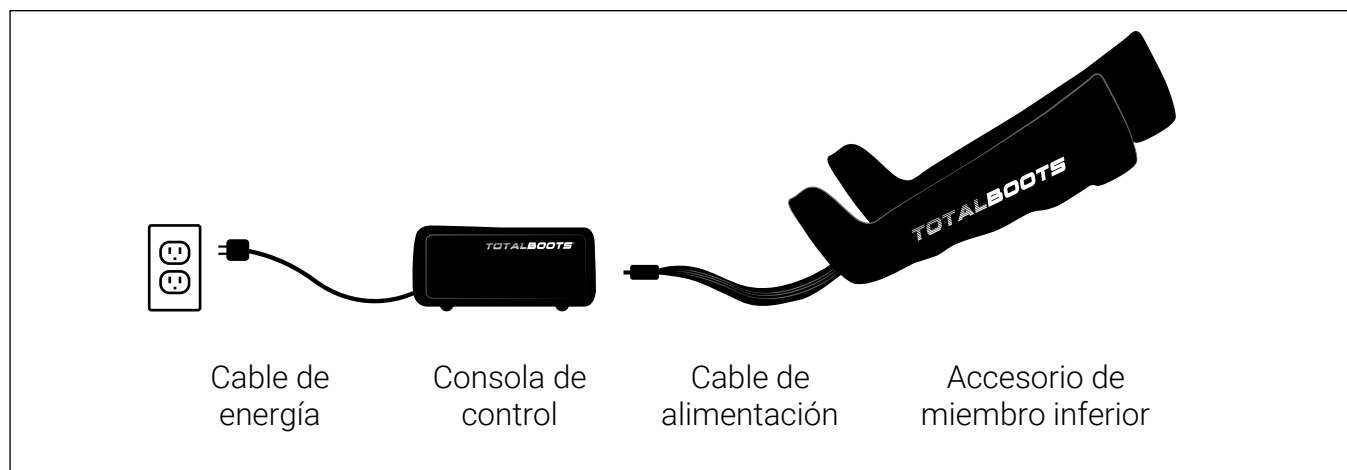

TOTALBOOTS®
PRESSURE THERAPY

HM MEDICAL

Calle Jorge Ezeta 485, Piso 2 - San Borja

CONTACTO

+51 972042130
info@hmmedical.pe