




TOTALBOOTS®

PRESSURE THERAPY

TOTALBOOTS®

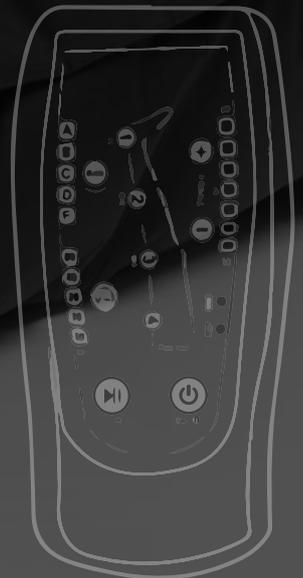



Descripción

TOTALBOOTS Recovery system es una excelente opción para cualquiera que busque un sistema de recuperación avanzado inalámbrico. Al ofrecer dos modos diferentes de compresión, la capacidad de ajustar la presión de cada compresión y múltiples opciones de tiempo, este sistema se posiciona como uno de los mejores sistemas de arranque de compresión en el mercado actual.

Contenido del paquete

	Caja de Presentación
	Accesorio de miembro inferior
	Consola de Control
	Mochila de Transporte
	Manual de usuario

Accesorio de miembro inferior



- 1 Zona de presión pie
- 2 Zona de presión pierna
- 3 Zona de presión rodilla
- 4 Zona de presión muslo
- 5 Conector del accesorio

Talla	Dimensiones
L	110cm de largo
	30cm ancho





Consola de Control



Especificaciones

ARTÍCULO	ÍNDICE TÉCNICO
Modelo	PT1003
Número de cámaras	4 cámaras
Tamaño de la máquina	265 × 130 × 100 mm
Peso (con accesorios)	1.45 kg
Manera de control	LED touch
tiempo de tratamiento	10~60 minutos
Presión de tratamiento	30~250 mmHg
Error de presión	< 15%
Tiempo del ciclo	85s~145s,±1s
Modos de tratamiento	5 modos
Configuración de la cámara	Sí

Advertencias

El Sistema **TOTALBOOTS** solo debe ser operado por personal médico calificado o fisioterapeuta.

La operación de estas unidades por cualquier otra persona es completamente responsable por sí misma.

El Sistema no es apto para su uso en presencia de mezclas inflamables con aire o con oxígeno u óxido nítrico.

No utilizar un cable de alimentación dañado o deshilachado. Desenchufe la consola y remita el servicio a personal calificado en las siguientes condiciones:

- Siempre apague la consola antes de descomprimir las prendas.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Si ha entrado líquido en la consola.
- Si la carcasa exterior de plástico está dañada.
- Si la consola no funciona normalmente, funcionamiento continuo,
- Funcionamiento ruidoso o bajo rendimiento.

Garantía

TOTALBOOTS recovery system ofrece a sus clientes una garantía de 1 año en todo lo relacionado con nuestro producto.

Si durante el primer año de la compra del dispositivo, este sufre alguna falla de fábrica en material o función, será llevado a revisión técnica en caso requiera repuestos o un dispositivo nuevo sin recargo alguno.

Esta garantía excluye:

- Daños ocasionados por accidentes, mal uso o transporte.
- Accesorios no utilizados según su función.
- Accesorios reparados por alguien no autorizado.
- Deterioro por un mal almacenamiento.
- Retraso en notificación de la falla después del plazo de compra.

TOTALBOOTS®
PRESSURE THERAPY

HM MEDICAL

Calle Jorge Ezeta 485, Of 201 - San Borja

CONTACTO

+51 972042130
info@hmmedical.pe